

MANUEL DE L'UTILISATEUR

LifeinaBox est un produit d'amour et de bonheur. Nous avons essayé de faire un appareil aussi simple et parfait que possible. Et nous voulons continuellement améliorer nos produits, donc si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@lifeina.com.

Merci de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.


QU'EST-CE QUE LIFEINABOX ?

LifeinaBox est un réfrigérateur miniature pour le transport et le stockage sécurisé des médicaments fragiles. LifeinaBox a un contrôleur de température qui maintient la température interne de LifeinaBox entre 2 et 8°C (36 et 46°F). LifeinaBox n'empêche pas la congélation d'un médicament si la température ambiante tombe en dessous de 0°C (32°F).

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

La batterie doit être complètement chargée avant d'utiliser l'appareil pour la première fois :

- 1) Connectez LifeinaBox à une alimentation électrique (1).
- 2) Faites glisser l'interrupteur O/I sous l'appareil en position ON (2).
- 3) Appuyez rapidement deux fois sur le bouton situé sur le côté de l'appareil pour l'éteindre complètement (3).
- 4) Laissez-le charger pendant deux heures.

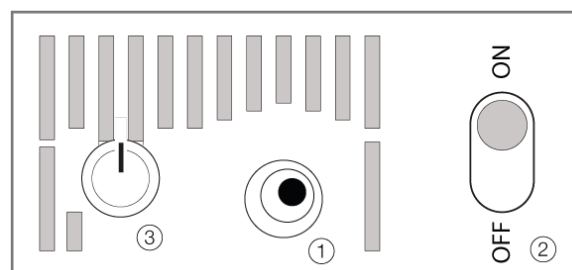

UTILISATION DE LIFEINABOX

- Connectez LifeinaBox au secteur et chargez complètement la batterie (voir ci-dessus).
- Allumez LifeinaBox en appuyant une fois sur le bouton sur le côté de l'appareil.
- Attendez que LifeinaBox atteigne une température stable (environ 15 minutes).
- Placez vos médicaments à l'intérieur.
- Pour utiliser l'application Lifeina, téléchargez l'application et activez-la à proximité de votre LifeinaBox.

Si vous utilisez LifeinaBox pour un médicament contenu dans des flacons en verre, nous vous conseillons de les protéger contre les bris accidentels.

NOTES

- Si vous envisagez d'utiliser LifeinaBox chez vous, éteignez la batterie (située sous l'appareil) afin qu'elle dure plus longtemps. Mais n'oubliez pas de la charger complètement avant de partir en voyage
- Si vous souhaitez utiliser le mode batterie, glissez le commutateur O/I situé sous l'appareil en position ON

Ne bloquez pas les fentes d'aération sur le côté et sous l'appareil

LifeinaBox est livré avec un connecteur 12V DC (pour la voiture) et un adaptateur secteur 110/240V (pour la maison). Des batteries supplémentaires Lifeina sont également

disponibles en option. Le fait de modifier le câble d'alimentation ou d'utiliser un câble qui n'était pas fourni avec LifeinaBox peut endommager l'appareil, mettre en péril l'efficacité de votre médicament et annuler votre garantie.

UTILISER L'APP LIFEINA

Téléchargez l'application Lifeina sur votre smartphone (iOS). Pour les utilisateurs de Android, ouvrez l'application Google Chrome sur votre téléphone et visitez www.lifeina.org.

- 1) Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
- 2) Branchez LifeinaBox à une source d'alimentation.
- 3) Ouvrez l'application Lifeina sur votre smartphone, proche de votre LifeinaBox.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ne laissez pas tomber l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Ne pliez pas les câbles d'alimentation.
- Les grilles de ventilation situées sous et sur les côtés de l'appareil ne doivent jamais être bouchées ou recouvertes. Elles doivent permettre à l'air de circuler en toutes circonstances. N'allumez pas LifeinaBox dans un espace confiné tel qu'un bagage ou un tiroir de bureau.
- LifeinaBox ne doit jamais être immergé dans un liquide ou être exposé à une humidité excessive. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau et éventuellement du savon doux et essuyez-le.
- Protégez l'appareil de l'humidité, des rayons directs du soleil et de la poussière.

LA GARANTIE QUALITÉ LIFEINA

Nous garantissons LifeinaBox pendant un an à compter de la date d'achat par le client. Pendant cette période, Lifeina assure la réparation gratuite des défauts internes ou des défauts éventuels de fabrication. Si vous rencontrez un problème avec votre LifeinaBox, veuillez l'emballer soigneusement avant de l'envoyer à votre distributeur.

Malheureusement, notre garantie ne couvre ni les dommages causés par la chute ou les impacts, ni les dommages causés par une mauvaise manipulation ou l'intervention d'un tiers, ni les dommages liés à des catastrophes naturelles ou par l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :	220 (W) x 107 (D) x 110 (H) mm
Capacité :	180 x 65 x 40 mm (468 cm ³)
Poids net :	1200 gm
Alimentation :	12V DC (voiture) ou 110-240V AC
Consommation moyenne :	25 watts max
Plage de température :	2°C à 8°C, +/- 1°C
Isolation :	mousse de polyuréthane sans CFC
Système :	technologie thermoélectrique avec ventilateur intérieur
Matériel :	ABS

Ces caractéristiques sont susceptibles de changer pour cause d'amélioration, sans préavis.

www.lifeina.com