

## BIENVENIDA A LA FAMILIA LIFEINA

LifeinaBox es un producto de amor y felicidad. Nos esforzamos por crear un dispositivo tan perfecto como fuera posible. Nos encanta mejorar continuamente nuestros productos. Si tiene algún comentario o sugerencia, no dude en contactarnos a través de [hello@lifeina.com](mailto:hello@lifeina.com).

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el dispositivo.


### ¿QUÉ ES LIFEINABOX?

LifeinaBox es un refrigerador en miniatura para el transporte y almacenamiento seguro de medicamentos frágiles. LifeinaBox tiene un controlador de temperatura, que enciende la unidad cuando la temperatura interna alcanza 8° C (46° F) y la apaga cuando baja a 2° C (36° F). LifeinaBox no evitará que el medicamento se congele si la temperatura ambiente es inferior a 0° C (32° F).

### CARGA DE LA BATERÍA

La batería de LifeinaBox debe estar totalmente cargada antes de utilizar el dispositivo.

- 1) Asegúrese de que el dispositivo esté conectado con el tomacorriente (1).
- 2) Lleve el interruptor O/I (debajo del dispositivo) a la posición ON (2).
- 3) Pulse el botón en la parte lateral del dispositivo dos veces, para apagar completamente el aparato LifeinaBox (3). El logotipo en el frente se apagará.
- 4) Deje el dispositivo conectado por dos horas para que se cargue la batería.

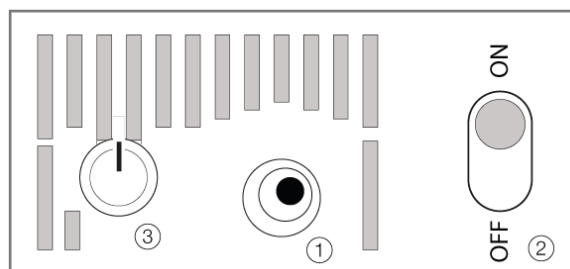

### UTILIZACIÓN DE LIFEINABOX

- Conecte LifeinaBox con el tomacorriente y cargue la batería completamente (v. arriba).
- Pulse el botón en la parte lateral del dispositivo una vez para encender LifeinaBox.
- Espere que la temperatura se estabilice (aproximadamente 20 minutos).
- Coloque su medicamento dentro.
- Para usar la aplicación Lifeina, enciéndala a distancia de su aparato LifeinaBox.
- Si está utilizando LifeinaBox para transportar viales de vidrio, le recomendamos que coloque material de relleno entre sus viales para protegerlos contra roturas accidentales.

### NOTAS

- Si está en casa, después de utilizar LifeinaBox, apague la batería (debajo del aparato) para que ésta dure más tiempo. Pero no se olvide de cargarla antes de viajar.
- Si va a usar el aparato con batería, presione el interruptor O/I (debajo del dispositivo) a la posición ON.

**Por favor, no bloquee las aberturas de ventilación al lado o debajo del dispositivo.**

LifeinaBox viene con un conector CC de 12V (para el automóvil) y un adaptador CA de 110/240 V (para la casa). Por separado también se pueden comprar baterías Lifeina. La modificación del cable de alimentación o el uso de un cable que no haya sido suministrado por LifeinaBox pueden dañar la unidad, poner en peligro la eficacia de su medicamento y anular su garantía.

## USO DE LA APLICACIÓN LIFEINA

Descargue la aplicación Lifeina en su smartphone (iOS). Para teléfonos Android, vaya al sitio [www.lifeina.org](http://www.lifeina.org) desde su aplicación Google Chrome.

- 1) Encienda el Bluetooth en su smartphone y asegúrese de que esté conectado a internet.
- 2) Conecte LifeinaBox a una fuente de energía.
- 3) Abra la aplicación Lifeina en su smartphone y colóquelo cerca de LifeinaBox.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No deje caer, modificar o desmontar el dispositivo.
- No doble ni tuerza los cables de alimentación.
- Hay salidas de aire a los lados y debajo del dispositivo. Estas ventilaciones deben mantenerse libres para que circule el aire. No conecte LifeinaBox a una fuente de energía cuando el dispositivo se encuentra en un área cerrada, como equipaje de viaje o un cajón de escritorio.
- LifeinaBox nunca debe sumergirse en líquido o exponerse a humedad excesiva. Use un paño húmedo con agua o detergente neutro para limpiar el dispositivo.
- Evite las altas temperaturas, la luz solar directa, la humedad excesiva o el polvo.

## LA GARANTÍA DE CALIDAD LIFEINA

Tendrá una garantía de LifeinaBox durante un año, a partir de la fecha de compra por parte del cliente. Durante este período, Lifeina asegura la reparación gratuita de fallas internas o errores de fabricación. Si tiene un problema con su LifeinaBox, empaquételo cuidadosamente y envíelo a su distribuidor local.

Lamentablemente, nuestra garantía no cubre los daños causados por caídas o impactos, por un manejo inadecuado o la intervención de un tercero, por desastres naturales o por agua.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: 20 (Largo) x 10 (Ancho) x 9 (Alto) cm

Capacidad: 367 cm<sup>3</sup>

Peso neto: 770 g

Voltaje: 12V CC (automóvil) o 110-240V CA

Consumo de energía: 25 vatios máximo

Rango de temperatura: 2° C a 8° C, +/- 1° C

Aislamiento: espuma de poliuretano sin CFC

Sistema: tecnología termoeléctrica sin desgaste con ventilador de semiconductor interior

Material: ABS

*Las especificaciones están sujetas a mejoras técnicas, cambios o modificaciones sin previo aviso.*

[www.lifeina.com](http://www.lifeina.com)