

lifeinabox

Live your life



Manual de instrucciones



Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France
hello@lifeina.com

BIENVENIDOS A LA FAMILIA LIFEINA

LifeinaBox es un producto de amor y felicidad. Realmente hemos tratado de hacer un dispositivo lo más perfecto posible. Y nos encanta mejorar continuamente nuestros productos, por lo que si tiene algún comentario o sugerencia, no dude en contactarnos en hello@lifeina.com.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

¿QUÉ ES LIFEINABOX?

LifeinaBox es una nevera en miniatura para el almacenamiento seguro de medicamentos frágiles. LifeinaBox tiene un controlador de temperatura que enciende la unidad cuando la temperatura interna alcanza los 8 °C (46 °F) y la apaga cuando baja a 2 °C (36 °F). LifeinaBox no evitará que los medicamentos se congelen si la temperatura ambiente cae por debajo de 0 °C (32 °F).

LifeinaBox está diseñado para una operación simple y fácil. Enchufe el conector de alimentación correcto (automóvil, red eléctrica o batería) en el dispositivo, espere a que la temperatura se estabilice (aproximadamente 15 minutos) y coloque su medicamento dentro. Cuando la temperatura alcance entre 2 y 8 °C, el logotipo que se encuentra frente al dispositivo comenzará a “respirar” (aparecer y desaparecer). Hay un interruptor de batería O/I debajo del dispositivo. Si desea utilizar la batería, enciéndala.

El entorno en el que se utiliza LifeinaBox es muy importante. Debe usarse sobre una superficie completamente plana para que las aberturas debajo y en el costado del dispositivo queden despejadas. Si están bloqueados de alguna manera, LifeinaBox no estará a la temperatura adecuada para su medicación. Cuando viaje en automóvil, utilice la bolsa de transporte LifeinaTravel, de modo que LifeinaBox no se coloque en el piso del automóvil o en una superficie irregular. Si se coloca en el piso de un automóvil, absorberá polvo, lo que eventualmente bloqueará el ventilador.

LifeinaBox se envía con un conector de CC de 12 V (para el automóvil) y un adaptador de CA de 110/240 V (para la casa). Los paquetes de baterías Lifeina separados también están disponibles como compras independientes. La modificación del cable de alimentación o el uso de un cable que no se suministró con LifeinaBox puede dañar la unidad, poner en peligro la eficacia de su medicamento y anular su garantía.

Si está utilizando LifeinaBox para viales de medicamentos de vidrio, le recomendamos que coloque material de relleno entre los viales de medicamentos para protegerlos contra roturas accidentales.

CONEXIÓN A LA APLICACIÓN LIFEINA

Descarga la aplicación Lifeina en tu smartphone (iOS o Android).

- 1) Encienda el Bluetooth en su teléfono inteligente.
- 2) Conecte LifeinaBox a una fuente de alimentación.
- 3) Abra la aplicación Lifeina en su teléfono inteligente. Coloque LifeinaBox cerca de su teléfono inteligente y siga las instrucciones de la aplicación.

¿QUÉ SE ENTREGA CON EL LIFEINABOX?

- Una nevera portátil de unos 20 x 10 x 10 cm
- Un adaptador ACDC 110/220V con 4 enchufes diferentes para EE. UU., China, Europa, Suiza y el Reino Unido
- Un cable para enchufar LifeinaBox en el mechero de tu coche

¿CUÁL ES EL TAMAÑO DE LA CAVIDAD EN LIFEINABOX?

Las medidas exactas de la cavidad son 180 mm de ancho x 64 mm de profundidad x 40 mm de alto.

¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES EXTERNAS DE LIFEINABOX?

LifeinaBox mide 22 cm de ancho, 10,7 cm de alto y 11 cm de profundidad, y pesa unos 1.400 kg.

¿PARA QUÉ MEDICAMENTOS PUEDO UTILIZAR LIFEINABOX?

LifeinaBox está hecho para cualquier medicamento que deba mantenerse a una temperatura entre 2 y 8 °C (35,6 a 46,4 °F). Esto incluye insulinas, adrenalina, hormonas de crecimiento, medicamentos para la artritis y muchos más. La cavidad de LifeinaBox se adapta a plumas, jeringas o frascos precargados. Si cabe en la cavidad, se mantendrá a la temperatura adecuada. Descargue nuestra guía completa de medicamentos en www.lifeina.com para obtener más información.

CARGA DE LA BATERÍA DEL LIFEINABOX

La batería de LifeinaBox debe estar completamente cargada antes de comenzar a usar el dispositivo (consulte el Diagrama 1).

- 1) Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la corriente (1)
- 2) Mueva el interruptor O/I debajo del dispositivo a la posición ON (2)
- 3) Presione el botón en el costado del dispositivo (3) hasta que el logotipo en el frente se apague (unos 5 segundos)
- 4) Déjalo cargar durante dos horas o toda la noche.
- 5) Encienda el dispositivo presionando el botón en el costado del dispositivo y verifique que esté completamente cargado usando la aplicación Lifeina.

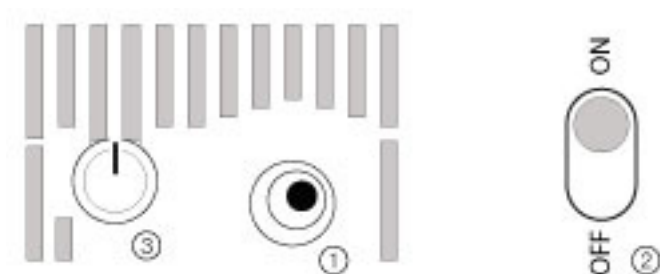


Diagrama 1

USO DE LIFEINABOX

- Conecte el dispositivo a la corriente y cargue completamente la batería (ver arriba)
- Encienda LifeinaBox presionando el botón en el costado del dispositivo
- Espere a que LifeinaBox alcance una temperatura estable (alrededor de 15 minutos)
- Coloque su medicamento dentro
- Para usar la aplicación Lifeina, simplemente descargue la aplicación y enciéndala a una distancia de su LifeinaBox

¿CUÁL ES LA TEMPERATURA DENTRO DE LIFEINABOX?

El entorno en el que se usa LifeinaBox tiene cierta influencia en la cantidad de enfriamiento que hará. Al igual que el refrigerador de su casa, será menos eficiente cuando esté expuesto a condiciones extremas.

LifeinaBox está configurado para mantener sus medicamentos entre las temperaturas de 2 y 8 °C (35,6 a 46,4 °F).

¿A QUÉ TEMPERATURA PUEDO UTILIZAR LIFEINABOX?

LifeinaBox se puede utilizar hasta una temperatura ambiente de 32 °C. A esta temperatura, todo en LifeinaBox se mantiene entre 2 y 8°C. Por otro lado, si usas LifeinaBox a esta temperatura, las baterías no durarán tanto.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA DENTRO DE LIFEINABOX?

LifeinaBox viene equipado con una batería interna de 6 horas, en caso de cortes de energía.

También hemos desarrollado paquetes de baterías independientes (LifeinaPower) de 6 horas cada uno. Estas baterías te darán más flexibilidad y se pueden recargar con los cables de tu teléfono móvil.

Para viajes, nuestras bolsas isotérmicas (LifeinaBag12 y LifeinaBag24) son más fáciles de usar al tomar un avión.

NOTAS SOBRE LAS BATERÍAS:

- Si planea usar LifeinaBox en casa, apague la batería (debajo del dispositivo) para que dure más. Pero no olvides cargarlo por completo antes de un viaje.
- Si desea utilizar el modo de batería, coloque el interruptor O/I debajo del dispositivo en la posición "ON"

APAGAR EL LOGO FRENTE A LIFEINABOX

Puede apagar el logotipo encendiendo la batería y luego haciendo doble clic en el botón O/I a la derecha del dispositivo.

USO DE LIFEINABOX EN UN COCHE

LifeinaBox se entrega con un conector de cable para el encendedor de cigarrillos de su automóvil. Sin embargo, para usar LifeinaBox en un automóvil, también debe usar la bolsa de transporte LifeinaTravel y colgar LifeinaBox en el respaldo de un asiento, de modo que los orificios de ventilación debajo del dispositivo estén despejados. Si coloca LifeinaBox en una superficie irregular, puede bloquear los orificios de ventilación, y si coloca LifeinaBox en el piso del automóvil, absorberá todo el polvo del piso del automóvil y esto eventualmente bloqueará el sistema de ventilación.

USO DE LIFEINABOX EN UN AVIÓN

LifeinaBox no fue realmente diseñado para usarse en un avión. Fue diseñado más para hoteles, automóviles, oficinas y hogares. Aunque puede usar LifeinaBox en un avión, es mucho más fácil usar nuestros LifeinaBags especialmente diseñados, que son mucho más simples y pueden deslizarse en su equipaje de mano. Sin embargo, si decide utilizar LifeinaBox en un avión, compre la bolsa de transporte LifeinaTravel que le permitirá transportar LifeinaBox con los orificios de ventilación abiertos.

¿DÓNDE DEBO GUARDAR MI LIFEINABOX CUANDO VUELO?

Apague el dispositivo y colóquelo en su equipaje principal. Siempre debe llevar consigo su medicación en todo momento, sea cual sea el medio de transporte; **NUNCA GUARDE SUS MEDICAMENTOS EN EQUIPAJE QUE SERÁ FACTURADO EN EL AVIÓN ¡ALMACENAMIENTO DE CARGA!** Si pierde su equipaje o si su vuelo se retrasa, podría arruinar sus vacaciones.

Aunque es posible usar LifeinaBox en un avión, pensamos que es más fácil para viajar en avión usar una de nuestras bolsas isotérmicas

(LifeinaBag12 o LifeinaBag 24, que también mantendrán tu medicación entre 2 y 8°C). Las bolsas son más fáciles de colocar en su bolso que en un refrigerador portátil. Tendemos a usar LifeinaBox más en un automóvil, hotel, casa que en un avión.

Pero si desea llevar su LifeinaBox de viaje con usted en el avión, realmente no hay ningún problema para hacerlo. Sin embargo, necesitará la bolsa LifeinaTravel para transportar su refrigerador, y es posible que también desee obtener una batería adicional (LifeinaPower).

¿PUEDO UTILIZAR LIFEINABOX EN MI EQUIPAJE DE MANO?

No. La razón de esto es que LifeinaBox es un frigorífico y requiere ventilación (debajo y en el lateral del dispositivo). Si lo coloca en una maleta cerrada y está encendido, el LifeinaBox se sobrecalentará. Si realmente quiere tomar el avión con LifeinaBox, entonces necesita usar LifeinaTravel, una bolsa de transporte especial que desarrollamos con aberturas para ventilación.

Cuando desarrollamos LifeinaBox, en realidad no estaba diseñado como un dispositivo para aviones. Fue desarrollado más bien para uso en hoteles, la oficina, el hogar o en el automóvil. Aunque en teoría es posible usarlo en aviones, no es muy práctico hacerlo. Es mucho más fácil utilizar una de nuestras bolsas isotérmicas (LifeinaBag), que mantendrán su medicación entre 2 y 8°C durante 12 o 24 horas y se pueden deslizar fácilmente en su equipaje de mano.

¿PUEDO UTILIZAR LIFEINABOX EN UN ARMARIO O EN UNA MALETA?

No. Al igual que un refrigerador normal, LifeinaBox enfría eliminando el calor. El calor necesita disiparse. Por lo tanto, no use LifeinaBox en un área donde haya poco o ningún intercambio de aire, ya que no habrá ningún lugar al que pueda ir el calor.

¿PUEDO UTILIZAR LIFEINABOX EN POSICIÓN VERTICAL?

No, si lo usa en posición horizontal bloqueará las salidas de aire y el dispositivo se sobrecalentará.

¿LIFEINABOX EVITARÁ QUE MI MEDICAMENTO SE CONGELE?

Un preajuste del dispositivo evita que su medicamento baje de 2 °C para garantizar que su medicamento nunca se congele. Sin embargo, el LifeinaBox debe usarse en temperaturas “normales”. Si mantiene su LifeinaBox a temperaturas bajo cero, no evitará que su medicamento se congele.

FUNCIÓN DE ALARMA

Una alarma comenzará a sonar cuando la batería tenga un 20 % de carga. Para apagar esta alarma, simplemente haga clic en el botón O/I a la derecha del dispositivo. Conecte su LifeinaBox a la red eléctrica lo antes posible para evitar una interrupción del suministro de frío.

¿POR QUÉ HAY UNA LUZ ROJA/AZUL INTERMITENTE AL LADO DE MI LIFEINABOX?

El pequeño lado de LifeinaBox (al lado del botón O/I) será azul fijo cuando LifeinaBox esté conectado a su teléfono o computadora a través de Bluetooth. Cuando parpadea alternativamente entre rojo y azul, significa que su dispositivo no está conectado a nada.

¿LIFEINABOX ES IMPERMEABLE?

No, LifeinaBox es como cualquier aparato eléctrico. No es resistente al agua y debe mantenerse en un ambiente seco.

¿CUÁNTA POTENCIA UTILIZA LIFEINABOX? ¿DAGOTARÁ LA BATERÍA DE MI COCHE?

LifeinaBox utiliza 4,5 amperios de 12 V CC, casi lo mismo que un solo faro. LifeinaBox no debe agotar ni dañar una batería completamente cargada cuando se usa con el motor en marcha. Cada vehículo y cada batería es único. Pida a su distribuidor o mecánico que verifique la calidad de su batería antes de enchufar un dispositivo que pueda descargarla.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No deje caer, modifique ni desmonte el dispositivo.
- No doble ni retuerza los cables de alimentación.
- Hay rejillas de ventilación a los lados y debajo del dispositivo. Estos respiraderos deben mantenerse libres para que circule el aire. No conecte LifeinaBox a una fuente de alimentación cuando se encuentre en un área cerrada, como equipaje empacado o un cajón de escritorio.
- LifeinaBox nunca debe sumergirse en líquido ni exponerse a una humedad excesiva. Utilice un paño humedecido con agua o detergente neutro para limpiar el dispositivo.
- Evite las altas temperaturas, la luz solar directa, la alta humedad o el polvo.

LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LIFEINA

Garantizamos LifeinaBox durante un año a partir de la fecha de compra por parte del cliente. Durante este período, Lifeina asegura la reparación gratuita de averías internas o errores de fabricación. Si tiene algún problema con su LifeinaBox, empaquételo con cuidado y envíelo a la oficina de Lifeina, junto con una copia de su factura.

Desafortunadamente, nuestra garantía no cubre los daños causados por caídas o impactos, por un manejo defectuoso o la intervención de un tercero, por desastres naturales o por agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: 220 (ancho) x 107 (fondo) x 110 (alto) mm

Capacidad: 180 x 65 x 40 mm (468 cm³)

Peso neto: 1400 g

Voltaje: 12 V CC (automóvil) o 110-240 V CA

Consumo de energía: 25 vatios máx.

Rango de temperatura: 2°C a 8°C, +/- 1°C

Aislamiento: espuma de poliuretano sin CFC

Sistema: Tecnología termoeléctrica sin desgaste con ventilador semiconductor interior

Material: ABS

Las especificaciones están sujetas a mejoras técnicas, cambios o modificaciones sin previo aviso.



www.lifeina.com

Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France

hello@lifeina.com