

lifeinabox

Live your life



Manuale di istruzioni (IT)



Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France
hello@lifeina.com

INDICE DEGLI ELEMENTI

<i>Che cos'è LifeinaBox?</i>	5
<i>Connessione all'app Lifeina</i>	6
<i>Cosa viene fornito con la lifeinaBox?</i>	6
<i>Quanto è grande la cavità nella LifeinaBox?</i>	6
<i>Quali sono le dimensioni esterne di LifeinaBox?</i>	6
<i>Per quali farmaci posso usare LifeinaBox?</i>	6
<i>Ricarica della batteria LifeinaBox</i>	7
<i>Utilizzo di LifeinaBox</i>	7
<i>Qual è la temperatura all'interno di LifeinaBox?</i>	8
<i>A quale temperatura posso usare LifeinaBox?</i>	8
<i>Quanto dura la batteria all'interno della LifeinaBox?</i>	8
<i>Disattivazione del logo davanti a LifeinaBox</i>	9
<i>Utilizzo di LifeinaBox in auto</i>	9
<i>Utilizzo di lifeinaBox su un aereo</i>	9
<i>Dove dovrei tenere la mia LifeinaBox quando prendo l'aereo?</i>	9
<i>Posso usare LifeinaBox nel mio bagaglio a mano?</i>	10
<i>Posso usare LifeinaBox in un armadio o in una valigia?</i>	10
<i>Posso usare LifeinaBox in posizione verticale?</i>	10
<i>LifeinaBox impedirà che i miei medicinali si congelino?</i>	11
<i>Funzione di allarme</i>	11
<i>Perché c'è una luce rossa/blu lampeggiante sul lato del mio LifeinaBox?</i>	11
<i>LifeinaBox è impermeabile?</i>	11
<i>Quanta energia consuma LifeinaBox?</i>	11
<i>Cura e manutenzione</i>	12
<i>La garanzia di qualità Lifeina</i>	12
<i>Specifiche tecniche</i>	13

BENVENUTO NELLA FAMIGLIA LIFEINA

LifeinaBox è un prodotto di amore e felicità. Abbiamo davvero cercato di rendere un dispositivo quanto più perfetto possibile. E amiamo migliorare continuamente i nostri prodotti, quindi se hai commenti o suggerimenti, non esitare a contattarci all'indirizzo hello@lifeina.com. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

COS'È LIFEINABOX?

LifeinaBox è un frigorifero in miniatura per la conservazione sicura di farmaci fragili. LifeinaBox è dotata di un controller della temperatura che accende l'unità quando la temperatura interna raggiunge 8°C (46°F) e la spegne quando scende a 2°C (36°F). LifeinaBox non impedisce il congelamento dei farmaci se la temperatura ambiente scende sotto 0°C (32°F).

LifeinaBox è progettato per un funzionamento semplice e facile. Collegare il connettore di alimentazione corretto (auto, rete o batteria) al dispositivo, attendere che la temperatura si stabilizzi (circa 15 minuti) e inserire il farmaco all'interno. Quando la temperatura raggiunge tra 2 e 8°C, il logo davanti al dispositivo inizierà a "respirare" (apparire e scomparire). Sotto il dispositivo è presente un interruttore O/I della batteria. Se vuoi usare la batteria, accendila.

L'ambiente in cui viene utilizzata LifeinaBox è molto importante. Dovrebbe essere utilizzato su una superficie completamente piana in modo che le aperture sotto e sui lati del dispositivo siano libere. Se sono bloccati in qualche modo, la LifeinaBox non sarà alla temperatura adeguata per i tuoi farmaci. Quando si viaggia in auto, utilizzare la borsa da trasporto LifeinaTravel, in modo che LifeinaBox non venga posizionata sul pavimento dell'auto o su una superficie irregolare. Se posizionato sul pavimento dell'auto, assorbirà la polvere, col tempo bloccando la ventola.

LifeinaBox viene fornito con un connettore CC da 12 V (per auto) e un adattatore CA da 110/240 V (per casa). I pacchi batteria Lifeina separati sono disponibili anche come acquisti indipendenti. La

modifica del cavo di alimentazione o l'utilizzo di un cavo non fornito con LifeinaBox può danneggiare l'unità, compromettere l'efficacia dei farmaci e invalidare la garanzia.

Se utilizzi LifeinaBox per fiale di farmaci in vetro, ti consigliamo di posizionare del materiale di riempimento tra le fiale di farmaci per proteggerle da rotture accidentali.

CONNESSIONE ALL'APP LIFEINA

Scarica l'app Lifeina sul tuo smartphone (iOS o Android).

- 1) Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.
- 2) Collega LifeinaBox a una fonte di alimentazione.
- 3) Apri l'app Lifeina sul tuo smartphone. Avvicina LifeinaBox al tuo smartphone e segui le istruzioni presenti nell'app.

COSA VIENE CONSEGNATO CON LA LIFEINABOX?

- Un frigorifero portatile di circa 20 x 10 x 10 cm
- Un adattatore ACDC 110/220 V con 4 spine diverse per USA, Cina, Europa, Svizzera e Regno Unito
- Un cavo per collegare LifeinaBox all'accendisigari dell'auto

QUAL È LA DIMENSIONE DELLA CAVITÀ NELLA LIFEINABOX?

Le misure esatte della cavità sono 180 mm di larghezza x 64 mm di profondità x 40 mm di altezza.

QUALI SONO LE DIMENSIONI ESTERNE DEL LIFEINABOX?

LifeinaBox misura 22 cm di larghezza, 10,7 cm di altezza e 11 cm di profondità e pesa circa 1.400 kg.

PER QUALI FARMACI POSSO UTILIZZARE LIFEINABOX?

LifeinaBox è realizzata per qualsiasi farmaco che debba essere conservato a una temperatura compresa tra 2 e 8°C (da 35,6 a

46,4°F). Ciò include insuline, adrenalina, ormoni della crescita, farmaci per l'artrite e molti altri. La cavità LifeinaBox può contenere penne, siringhe o fiale preriempite. Se entra nella cavità, verrà mantenuto alla temperatura corretta. Scarica la nostra guida completa ai farmaci su www.lifeina.com per ulteriori informazioni.

RICARICA DELLA BATTERIA LIFEINABOX

La batteria della LifeinaBox deve essere completamente carica prima di iniziare a utilizzare il dispositivo (vedere Figura 1).

- 1) Assicurarsi che il dispositivo sia collegato all'alimentazione (1)
- 2) Spostare l'interruttore O/I sotto il dispositivo in posizione ON (2)
- 3) Premere il pulsante sul lato del dispositivo (3) fino allo spegnimento del logo sulla parte anteriore (circa 5 secondi)
- 4) Lasciarlo caricare per due ore o durante la notte.
- 5) Accendi il dispositivo premendo il pulsante sul lato del dispositivo e verifica che sia completamente carico utilizzando l'app Lifeina.

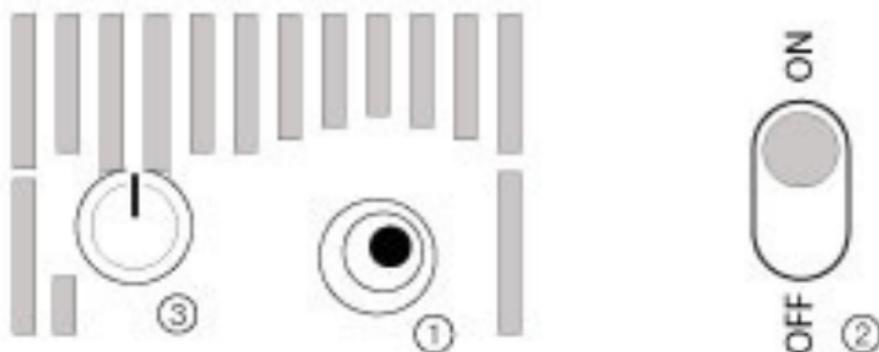


Diagramma 1

UTILIZZO DELLA LIFEINABOX

- Collegare il dispositivo all'alimentazione e caricare completamente la batteria (vedi sopra)
- Accendi LifeinaBox premendo il pulsante sul lato del dispositivo
- Attendere che LifeinaBox raggiunga una temperatura stabile (circa 15 minuti)

- Metti il farmaco all'interno
- Per utilizzare l'app Lifeina è sufficiente scaricare l'app e accenderla a distanza dalla tua LifeinaBox

QUAL È LA TEMPERATURA ALL'INTERNO DELLA LIFEINABOX?

L'ambiente in cui viene utilizzata LifeinaBox ha una certa influenza sulla quantità di raffreddamento che effettuerà. Proprio come il tuo frigorifero di casa, sarà meno efficiente se esposto a condizioni estreme. LifeinaBox è impostata per conservare i tuoi farmaci a temperature comprese tra 2 e 8°C (da 35,6 a 46,4°F).

A CHE TEMPERATURA POSSO UTILIZZARE LIFEINABOX?

LifeinaBox può essere utilizzata fino ad una temperatura ambiente di 32°C. A questa temperatura tutto nella LifeinaBox rimane tra 2 e 8°C. D'altra parte, se utilizzi LifeinaBox a questa temperatura, le batterie non dureranno altrettanto a lungo.

QUANTO DURA LA BATTERIA ALL'INTERNO DELLA LIFEINABOX?

LifeinaBox è dotata di una batteria interna con autonomia di 6 ore, in caso di interruzioni di corrente.

Abbiamo anche sviluppato pacchi batterie indipendenti (LifeinaPower) da 12 ore ciascuno. Queste batterie ti daranno maggiore flessibilità e potranno essere ricaricate con i cavi del tuo cellulare.

Per i viaggi, le nostre borse termiche (LifeinaBag12 e LifeinaBag24) sono più facili da usare quando si prende l'aereo.

NOTE SULLE BATTERIE:

- Se prevedi di utilizzare LifeinaBox a casa, spegni la batteria (sotto il dispositivo) per farla durare più a lungo. Ma non dimenticare di caricarlo completamente prima di un viaggio.
- Se si desidera utilizzare la modalità batteria, impostare l'interruttore O/I sotto il dispositivo sulla posizione "ON".

SPEGNI IL LOGO DAVANTI A LIFEINABOX

È possibile disattivare il logo accendendo la batteria e quindi facendo doppio clic sul pulsante O/I sulla destra del dispositivo.

UTILIZZO DEL LIFEINABOX IN AUTO

LifeinaBox viene consegnata con un cavo connettore per l'accendisigari della tua auto. Tuttavia, per utilizzare LifeinaBox in macchina, è necessario utilizzare anche la borsa da trasporto LifeinaTravel e appendere LifeinaBox sullo schienale di un sedile, in modo che i fori di ventilazione sotto il dispositivo siano liberi. Se posizioni la LifeinaBox su una superficie irregolare, potrebbe bloccare i fori di ventilazione, mentre se posizioni la LifeinaBox sul pavimento dell'auto, assorbirà tutta la polvere dal pavimento dell'auto e questo alla fine bloccherà il sistema di ventilazione.

UTILIZZO DELLA LIFEINABOX SU UN AEREO

La LifeinaBox non è stata realmente progettata per essere utilizzata su un aereo. È stato progettato più per hotel, automobili, uffici e case. Anche se puoi utilizzare la LifeinaBox su un aereo, è molto più semplice utilizzare le nostre LifeinaBag appositamente progettate, che sono molto più semplici e possono scivolare nel bagaglio a mano. Tuttavia, se decidi di utilizzare la LifeinaBox su un aereo, acquista la LifeinaTravel Carry Bag che ti permetterà di trasportare la LifeinaBox con le prese d'aria aperte.

DOVE DEVO CONSERVARE LA MIA LIFEINABOX QUANDO VOLO?

Spegni il dispositivo e mettilo nel bagaglio principale. Dovresti sempre portare con te i tuoi farmaci, indipendentemente dal mezzo di trasporto; **NON CONSERVARE MAI I FARMACI BAGAGLI CHE VERRANNO CONTROLLATI SULL'AEREO STOCCAGGIO DI CARICA!** Se perdi i bagagli o il tuo volo subisce un ritardo, la tua vacanza potrebbe rovinarsi.

Sebbene sia possibile utilizzare LifeinaBox in aereo, riteniamo che sia più semplice per i viaggi in aereo utilizzare una delle nostre

borse termiche (LifeinaBag12 o LifeinaBag 24, che manterrà anche i tuoi farmaci tra 2 e 8°C). Le borse sono più facili da inserire nella borsa rispetto a un frigorifero portatile. Tendiamo a utilizzare LifeinaBox più in macchina, in hotel, a casa che in aereo.

Ma se vuoi portare la tua LifeinaBox in viaggio con te in aereo, non c'è davvero nessun problema a farlo. Tuttavia, per trasportare il frigorifero avrai bisogno della borsa LifeinaTravel e potresti anche voler acquistare una batteria extra (LifeinaPower).

POSSO UTILIZZARE LIFEINABOX NEL MIO BAGAGLIO A MANO?

No. Il motivo è che LifeinaBox è un frigorifero e necessita di ventilazione (sotto e lateralmente al dispositivo). Se lo metti in una valigia chiusa ed è acceso, LifeinaBox si surriscalderebbe. Se vuoi davvero prendere l'aereo con LifeinaBox, allora devi usare LifeinaTravel, una speciale borsa da trasporto che abbiamo sviluppato con aperture per la ventilazione.

Quando abbiamo sviluppato LifeinaBox, in realtà non è stato progettato come un dispositivo aereo. È stato sviluppato più per l'uso in hotel, in ufficio, a casa o in macchina. Anche se teoricamente è possibile utilizzarlo sugli aerei, non è molto pratico farlo. È molto più semplice utilizzare una delle nostre borse termiche (LifeinaBag), che manterrà i tuoi farmaci a 2-8°C per 12-24 ore e può essere facilmente infilata nel bagaglio a mano.

POSSO UTILIZZARE LIFEINABOX IN UN ARMADIO O IN UNA VALIGIA?

No. Proprio come un normale frigorifero, LifeinaBox raffredda sottraendo calore. Il calore deve essere dissipato. Pertanto, non utilizzare LifeinaBox in una zona dove c'è poco o nessun ricambio d'aria, poiché il calore non avrà alcun posto dove andare.

POSSO UTILIZZARE LIFEINABOX IN POSIZIONE VERTICALE?

No, se lo usi in posizione orizzontale ostruirà le prese d'aria e il

dispositivo si surriscaldereà.

LIFEINABOX IMPEDIRÀ IL CONGELAMENTO DEI MIEI FARMACI?

Una preimpostazione del dispositivo impedisce che il farmaco scenda al di sotto dei 2°C per garantire che il farmaco non si congeli mai. Tuttavia, la LifeinaBox dovrebbe essere utilizzata a temperature “normali”. Mantenere la LifeinaBox a temperature sotto lo zero non impedirà il congelamento dei farmaci.

FUNZIONE ALLARME

Un allarme inizierà a suonare quando la batteria avrà raggiunto il 20% di carica. Per disattivare questo allarme, è sufficiente fare clic sul pulsante O/I sulla destra del dispositivo. Collega la tua LifeinaBox alla rete elettrica il prima possibile per evitare un'interruzione della fornitura di freddo.

PERCHÉ C'È UNA LUCE ROSSA/BLU LAMPEGGIANTE ACCANTO ALLA MIA LIFEINABOX?

Il lato piccolo della LifeinaBox (accanto al pulsante O/I) sarà blu fisso quando la LifeinaBox è collegata al telefono o al computer tramite Bluetooth. Quando lampeggia alternativamente tra rosso e blu, significa che il tuo dispositivo non è connesso a nulla.

LIFEINABOX È IMPERMEABILE?

No, LifeinaBox è come qualsiasi dispositivo elettrico. Non è impermeabile e deve essere conservato in un ambiente asciutto.

QUANTA ENERGIA UTILIZZA LIFEINABOX? CONSUMERÀ LA BATTERIA DELLA MIA AUTO?

LifeinaBox utilizza 4,5 A di 12 V CC, più o meno come una lampada frontale singola. La LifeinaBox non dovrebbe scaricare o danneggiare una batteria completamente carica se utilizzata con il motore acceso. Ogni veicolo e ogni batteria sono unici. Chiedi al tuo rivenditore o meccanico di verificare la qualità della batteria prima

di collegare un dispositivo che possa scaricarla.

CURA E MANUTENZIONE

- Non far cadere, modificare o smontare il dispositivo.
- Non piegare o torcere i cavi di alimentazione.
- Sono presenti prese d'aria sui lati e sul fondo del dispositivo. Queste prese d'aria devono essere mantenute libere per la circolazione dell'aria. Non collegare LifeinaBox a una fonte di alimentazione quando si trova in un'area chiusa, come un bagaglio imballato o un cassetto della scrivania.
- LifeinaBox non deve mai essere immersa in liquidi o esposta a umidità eccessiva. Utilizzare un panno inumidito con acqua o detergente neutro per pulire il dispositivo.
- Evitare temperature elevate, luce solare diretta, elevata umidità o polvere.

LA GARANZIA DI QUALITÀ LIFEINA

Garantiamo LifeinaBox per un anno dalla data di acquisto da parte del cliente. Durante questo periodo Lifeina garantisce la riparazione gratuita di guasti interni o errori di fabbricazione. Se riscontri problemi con la tua LifeinaBox, imballala con cura e inviala all'ufficio Lifeina, insieme a una copia della fattura.

Purtroppo la nostra garanzia non copre i danni causati da cadute o urti, da manipolazione errata o dall'intervento di terzi, da calamità naturali o dall'acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni:	220 (larghezza) x 107 (profondità) x 110 (altezza) mm
Capacità:	180 x 65 x 40 mm (468 cm ³)
Peso netto:	1400 g
Voltaggio:	12 V CC (auto) o 110-240 V CA
Consumo energetico:	25 watt massimo.
Intervallo di temperatura:	da 2°C a 8°C, +/- 1°C
Isolamento:	schiuma poliuretana senza CFC
Sistema:	tecnologia termoelettrica esente da usura con ventola interna a semiconduttore
Materiale:	ABS

Le specifiche sono soggette a miglioramenti tecnici, cambiamenti o modifiche senza preavviso.



www.lifeina.com

Lifeina

6 rue de Castellane
75008, Paris, France

hello@lifeina.com